

SARSTEDT Schutzgefäße für den Versand von biologischem Stoff der Kategorie B sowie von freigestellten medizinischen Proben


Die in der Tabelle aufgeführten Sarstedt Schutzgefäße erfüllen die Anforderungen der Verpackungsanweisung P 650 der ADR sowie der PI 650 der IATA.

Für eine richtlinienkonforme Anwendung der Schutzgefäße sind nachfolgende Punkte zu beachten:

- 1. Beim Versand von flüssigem Probengut nur Schutzgefäße mit Saugeinlage verwenden.
- 2. Das Probenvolumen darf nicht größer sein als die Saugfähigkeit der Saugeinlage.
- 3. Für den Versand von Probengut nur geeignete Probengefäße verwenden, Beispiele siehe Tabelle.
- 4. Der Schraubverschluss des Schutzgefäßes dichtet über eine Dichtwulst innen im Gefäß ab. Den Verschluss bis zum Anschlag handfest andrehen.
- 5. Ein Lagern der Gefäße bei Sonneneinstrahlung beschleunigt die Alterung und sollte vermieden werden.
- 6. Das Schutzgefäß kann bei 121°C autoklaviert werden. Verschluss beim Autoklavieren nur lose, nicht abdichten aufdrehen. Nach mehrmaligem Autoklavieren kann das Abdichtverhalten beeinträchtigt werden. Keine beschädigten Gefäße mehrmals verwenden.
- 7. Für den Postversand der Schutzgefäße ist eine geeignete Umverpackung zu benutzen.
  - Für den Versand von biologischem Stoff der Kategorie B ist eine kistenförmige, bauartgeprüfte Außenverpackung, z.B. Sarstedt Versandbox, zu wählen.
  - Beim Versand von freigestellten medizinischen Proben ohne Krankheitserreger muss eine geeignete widerstandsfähige Umverpackung, z.B. Sarstedt Versandbox oder Versandhüllen, verwendet werden.
- 8. Bitte beachten Sie, dass die Verpackungsvorschriften je nach dem befördernden Unternehmen sowie aufgrund von länderspezifischen, gesetzlichen Vorschriften von den o.g. Empfehlungen abweichen können.

| Bezeichnung                               | Schutzgefäß<br>85 x Ø 30 mm   | Schutzgefäß<br>126 x Ø 30 mm   | Schutzgefäß<br>114 x Ø 44 mm   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikel Nr. mit Saugeinlage               | 78.892                        | 78.898                         | 78.897                         |
| Artikel Nr. ohne Saugeinlage              | 78.890                        | 78.896                         | 78.895                         |
| Artikel Nr. Verschluss farblos*           | 65.676                        | 65.679                         | 65.678                         |
| Artikel Nr. separate Saugeinlage          | 78.684                        | 78.670                         | 78.669                         |
| Saugfähigkeit Saugeinlage                 | 8 ml                          | 12 ml                          | 16 ml                          |
| Beispiele für kombinierbare Probengefäße: |                               |                                |                                |
| S-Monovette®                              | 65 x Ø 13,0                   | 92 x Ø 16,5                    |                                |
| S-Monovette®                              | 66 x Ø 11,5                   | 92 x Ø 15,3                    |                                |
| S-Monovette®                              | 66 x Ø 8,5                    | 75 x Ø 15,3                    |                                |
| S-Monovette®                              |                               | 90 x Ø 13,0                    |                                |
| S-Monovette®                              |                               | 92 x Ø 11,5                    |                                |
| PP-Röhre mit Schraubverschluss            | 66 x Ø 11,5<br>REF 60.549.... | 101 x Ø 16,5<br>REF 60.541.... | 107 x Ø 25,0<br>REF 62.543.... |
| PP-Röhre mit Schraubverschluss            | 57 x Ø 16,5<br>REF 60.542.... | 92 x Ø 15,3<br>REF 62.610....  |                                |
| PP-Röhre mit Schraubverschluss            | 76 x Ø 20,0<br>REF 60.732.... | 120 x Ø 17,0<br>REF 62.554.... |                                |
| PP-Stuhlröhre mit Schraubverschluss       | 76 x Ø 20,0<br>REF 80.734.... | 101 x Ø 16,5<br>REF 80.623.... | 107 x Ø 25,0<br>REF 80.622.... |

\*) Für Schutzgefäße 85 x Ø 30 mm und 126 x Ø 30 mm sind auch farbige Verschlüsse lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten

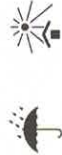

SARSTEDT mailing containers for the transport of biological substances of category B and exempt human specimens

The Sarstedt mailing containers listed below meet the requirements of the P 650 Packaging Instructions of ADR and PI 650 of IATA.

The following must be observed to use the mailing containers in accordance with these guidelines:

- 1. For the dispatch of liquid specimens, use mailing containers with absorbent liner only.
- 2. The sample volume must not exceed the absorbency of the absorbent liner.
- 3. Use only suitable mailing containers for specimen transport (refer to table below for examples).
- 4. The screw cap of the mailing container seals by means of a sealing rim inside. Screw on cap hand-tight to ensure proper sealing.
- 5. Storing the container in direct sunlight accelerates the aging process and should be avoided.
- 6. The mailing container can be autoclaved at 121°C. For autoclaving, the cap must be loosened rather than sealed tightly. Repeated autoclaving might impair the sealing effect. Do not use damaged containers.
- 7. Use appropriate outer packaging to dispatch mailing containers by post.
  - Use a box-shaped, type-approved outer packaging, e.g. the Sarstedt mailing box, for the transport of biological substances of category B.
  - Use a suitable robust outer packaging, e.g. the Sarstedt mailing box or mailing envelopes, for the transport of exempt human specimens.
- 8. It should be noted that packaging instructions may deviate from the above recommendations depending on the transport carrier as well as subject to the specific regulations prevailing in individual countries.

| Description                                               | Mailing container<br>85 x Ø 30 mm | Mailing container<br>126 x Ø 30 mm | Mailing container<br>114 x Ø 44 mm |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Art. no. with absorbent liner                             | 78.892                            | 78.898                             | 78.897                             |
| Art. no. without absorbent liner                          | 78.890                            | 78.896                             | 78.895                             |
| Art. no. cap, neutral*                                    | 65.676                            | 65.679                             | 65.678                             |
| Art. no. separate absorbent liner                         | 78.684                            | 78.670                             | 78.669                             |
| Absorbency of liner                                       | 8 ml                              | 12 ml                              | 16 ml                              |
| Examples of mailing containers that can be combined with: |                                   |                                    |                                    |
| S-Monovette®                                              | 65 x Ø 13.0                       | 92 x Ø 16.5                        |                                    |
| S-Monovette®                                              | 66 x Ø 11.5                       | 92 x Ø 15.3                        |                                    |
| S-Monovette®                                              | 66 x Ø 8.5                        | 75 x Ø 15.3                        |                                    |
| S-Monovette®                                              |                                   | 90 x Ø 13.0                        |                                    |
| S-Monovette®                                              |                                   | 92 x Ø 11.5                        |                                    |
| PP tube with screw cap                                    | 66 x Ø 11.5<br>REF 60.549....     | 101 x Ø 16.5<br>REF 60.541....     | 107 x Ø 25.0<br>REF 62.543....     |
| PP tube with screw cap                                    | 57 x Ø 16.5<br>REF 60.542....     | 92 x Ø 15.3<br>REF 62.610....      |                                    |
| PP tube with screw cap                                    | 76 x Ø 20.0<br>REF 60.732....     | 120 x Ø 17.0<br>REF 62.554....     |                                    |
| PP faeces tube with screw cap                             | 76 x Ø 20.0<br>REF 80.734....     | 101 x Ø 16.5<br>REF 80.623....     | 107 x Ø 25.0<br>REF 80.622....     |

\*) For mailing containers 85 x Ø 30 mm and 126 x Ø 30 mm coloured screw caps are also available. Technical modifications reserved

